



Suma Med Alu

L10

Konzentrierter, flüssiger, maschineller Reiniger für die Reinigung von medizinischen Geräten

Produktbeschreibung

Suma Med Alu ist ein konzentrierter, maschineller Reiniger, der speziell für die Verwendung in Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zur Reinigung von invasiven und nicht-invasiven medizinischen Geräten entwickelt wurde.

Eigenschaften

Suma Med Alu ist speziell formuliert für den Einsatz in einer Vielzahl von Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten in Laboren und zur maschinelle Reinigung medizinischer Geräte. Speziell geeignet für die Anwendung auf weichen Metallen wie Aluminium, Kupfer oder Silber.

Vorteile

- Sicher für die Verwendung auf Aluminium und anderen weichen Metallen
- Enthält starke Emulgatoren und Dispersionsmittel zur Entfernung von Fett- und Proteinverschmutzungen
- Geeignet für alle Wasserverhältnisse
- Die konzentrierte Formulierung bietet eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit bei der Anwendung

Anwendungshinweise

Suma Med Alu wird normalerweise mit automatischen Dosiergeräten von Diversey angewendet. Es kann jedoch auch in Verbindung mit integrierten Dosierpumpen verwendet werden, sofern diese vorhanden sind. Spülen Sie bei der ersten Anwendung die Pumpe und die Transportschläuche des Dosiersystems, um ein mögliches Auskristallisieren in diesen Schläuchen durch das Mischen der Produkte zu vermeiden. Trocknen Sie das Medizinprodukt vor dem Gebrauch. Außerdem müssen die Medizinprodukte anschliessend sterilisiert werden, wenn sie invasiv sind. Unter normalen Einsatzbedingungen sind Spezialhandschuhe und eine Schutzbrille erforderlich.

Dosierung*

Automatische Dosierung von 1,5-3 g/L, je nach örtlichen Gegebenheiten, in eine Reinigungsmaschine.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

Suma Med Alu ist ein konzentriertes, flüssiges maschinelles Reinigungsmittel, das speziell für die Verwendung in einer Vielzahl von Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten entwickelt wurde. Speziell formuliert für den Einsatz auf weichen Metallen wie Aluminium, Kupfer oder Silber. Kompatibel mit rostfreiem Stahl. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Vorgesehene Benutzer


Autorisiertes, geschultes Personal in einer Gesundheitseinrichtung. Nur für den professionellen Gebrauch.



EU Ecolabel: SE/038/001



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

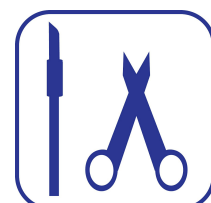



Suma Med Alu

L10

Technische Daten

Aussehen:	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
Duft:	Geruchlos
pH-Wert (pur):	> 11.5
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	> 11 (0.4 %)
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.27

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten: sds.diversey.com. Bei der Handhabung gute Arbeitshygiene- und Sicherheitspraktiken einhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Nicht mit anderen Produkten mischen, außer auf Anweisung von Diversey. In geschlossenen Originalbehältern lagern und vor extremen Temperatur aufbewahren. Das Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Achtung

Lagertemperaturen 0-40 °C.

Sollte es im Zusammenhang mit der Anwendung von Suma Med Alu zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen, sollte der Anwender dies der örtlichen Diversey-Niederlassung und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, melden. Nicht wiederverwenden. Das Produkt ist nicht für die Anwendung auf der menschlichen Haut bestimmt. Suma Med Alu ist nicht für die Verwendung auf porösen oder alkaliempfindlichen Medizinprodukten außer Aluminium bestimmt. Nicht auf Medizinprodukten aus Polyethylenterephthalat (PET) verwenden. Ohne ordnungsgemäße Sterilisation ist das Produkt nicht für die Verwendung auf invasiven Medizinprodukten vorgesehen, die Gewebe durchdringen oder in den Blutkreislauf eindringen oder in direkten Kontakt mit intakten Schleimhäuten kommen. Verwenden Sie Suma Med Alu nicht auf Medizinprodukten aus Kunststoff. Andere als die angegebenen Verwendungszwecke werden nicht empfohlen. Vor den Pausen und am Ende des Arbeitstages die Hände waschen. Nach dem Umgang mit Suma Med Alu Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Persönliche Schutzausrüstung wie erforderlich verwenden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Suma Med Alu Enthält Dinatriummetasilikat (Natriummetasilikat) und kann verursachen: Hautreizung, Schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise: Tragen Sie einen Augen- oder Gesichtsschutz. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht durchführbar. Weiter spülen. Sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, einen Arzt oder eine Ärztin anrufen.

Persönliche Schutzausrüstung

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen für die Handhabung des unverdünnten Produkts: Abdecken von Tätigkeiten wie Abfüllen und Umfüllen des Produkts in Anwendungsgeräte, Flaschen oder Eimer.

	Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz	Sicherheitsbrille oder Schutzbrille (EN 166).
Handschutz	Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374).

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit dem verdünnten Produkt: Keine besonderen Anforderungen bei normaler Verwendung.



Suma Med Alu

L10

Hinweise zur Entsorgung

Der konzentrierte Inhalt oder kontaminierte Verpackungen sollten von einem zertifizierten Entsorger oder gemäß der Standortgenehmigung entsorgt werden. Von der Einleitung von Abfällen in die Kanalisation wird abgeraten. Das gereinigte Verpackungsmaterial eignet sich für die energetische Verwertung oder das Recycling in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung.

Europäischer Abfallkatalog: 20 01 29* - Detergenzien, die gefährliche Stoffe enthalten.

Leere Verpackung Empfehlung: Unter Beachtung der nationalen oder örtlichen Vorschriften entsorgen.

Geeignete Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit einem Reinigungsmittel.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 15/01/2025 de-DE (K00235)