



Oxivir Sporicide

Desinfektionsreiniger für nicht-invasive Medizinprodukte und nicht poröse Oberflächen

Produktbeschreibung


Oxivir Sporicide von Diversey ist ein gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel, das wirksam gegen *Clostridioides difficile* und *Bacillus subtilis* ist. Oxivir Sporicide basiert auf der von Diversey patentierten beschleunigten Wasserstoffperoxidformulierung und kann auf harten, nicht porösen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten verwendet werden.

Eigenschaften

- Wirksam gegen *Clostridioides difficile* (C. diff.) in 5 Minuten (gem. EN17162)
- Bakterizid und wirksam gegen alle Viren in nur 1 Minute
- Positives Sicherheitsprofil für Anwender und Oberflächen im Vergleich zu anderen sporizid wirkenden Produkten
- Wirksamer Reiniger
- Frei von Parfüm
- Der Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff - Es bleiben keine aktiven Rückstände auf der Oberfläche zurück
- Enthält weder Chlor noch Alkohol
- VAH zertifiziert

Vorteile

- Ausgezeichnete Wirksamkeit gegen *Clostridioides difficile* (C. diff.) bei Ausbrüchen
- Das breite Wirkungsspektrum gegen pathogene Krankheitserreger bietet ein Höchstmaß an Patientenschutz
- Kurze Einwirkzeiten vereinfachen es die Oberfläche feucht zu halten und gewährleisten so die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels
- Kein Nachspülen erforderlich
- Verursacht keine Reizung der Atemwege
- Geeignet für den Einsatz in Hochrisikobereichen im Gesundheitswesen, einschließlich Intensivstation, Neugeborenenstation, Patienten- und Isolierzimmern
- Der Schaumsprühkopf ermöglicht eine effiziente Anwendung

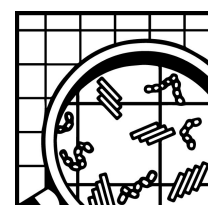

© A.I.S.E



Oxivir Sporicide

Anwendungshinweise

Desinfektionsreinigung:

1. Verwendung auf Oberflächen: Verschmutzung mit feuchtem Tuch/Handpad entfernen. Lösung mit einem sauberen Tuch auftragen oder direkt auf die Oberfläche sprühen. Auf vollständige Benetzung achten.
2. Vorgeschriebene Einwirkzeiten beachten (siehe Tabelle). **Einwirkzeit Medizinischer Bereich mit Mechanik (wischen):** bakterizid: 1 Minute, levurozid: 5 Minute, fungizid: 7 Minuten, viruzid: 1 Minute, mykobakterizid (inkl. tuberkulozid): 10 Minuten, sporizid (C. Diff): 5 Minuten. Während der Kontaktzeit nass einwirken lassen.
3. Nach der Einwirkzeit lufttrocknen lassen oder trockenwischen.

Wichtig: Nicht für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet. Nicht in Verbindung mit anderen Produkten verwenden. Das Produkt ist nicht zur Anwendung auf porösen oder säureempfindlichen Oberflächen vorgesehen.

Dosierung*

Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich. Weitere Details zu den Einwirkzeiten siehe Wirksamkeitstabelle

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Technische Daten

Aussehen:	Klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	2.7 ± 0.3
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03
Haltbarkeit:	720 Tage

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Achtung

Reagiert mit oxidierbaren Substanzen

Materialverträglichkeit

Wichtig: Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen ist Diversey Oxivir Sporicide für den Einsatz auf den meisten üblicherweise vorkommenden Materialien geeignet.



Oxivir Sporicide

Mikrobiologische Daten

	EN Norm	Belastung	Einwirkzeit
Bakterizide Wirksamkeit	EN13727	mit Belastung (medizinischer Bereich)	30 Sek.
	EN16615	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	EN13697	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	EN1276	mit Belastung	1 Min
	EN13697	mit Belastung	1 Min
Levurozide Wirksamkeit	EN13624	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	EN16615	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min
	EN13697	mit Belastung (medizinischer Bereich)	2 Min
	EN1650	mit Belastung	1 Min
	EN13697	mit Belastung	1 Min
Viruzide Wirksamkeit	EN14476 Adenovirus	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	EN14476 Poliovirus	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	EN14476 Murine norovirus	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
	Voll viruzid wirksam gegen alle Viren (EN14476)	mit Belastung (medizinischer Bereich)	1 Min
Fungizide Wirksamkeit	EN13624	mit Belastung (medizinischer Bereich)	6 Min
	EN16615	mit Belastung (medizinischer Bereich)	7 Min
	EN13697	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min
	EN1650	mit Belastung	6 Min
	EN13697	mit Belastung	6 Min
Mykobakterizide Wirksamkeit	EN14348 Mycobacterium avium	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min
	EN14348 Mycobacterium terrae (Tb)	mit Belastung (medizinischer Bereich)	10 Min
	EN16615 M. avium; M terrae	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min
Sporizide Wirksamkeit	EN13704 B. subtilis	mit Belastung	15 Min
	EN17126 (2018) C. diff.	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min
	EN16615 C. diff	mit Belastung (medizinischer Bereich)	5 Min

Wirksamkeit durch Erfüllung der europäischen Normen nachgewiesen.

Zulassungen

DE: BAuA-Registriernummer: N-72807

CH: Zulassungsnummer: CHZN4674

Wirkstoffe: 7.0 g/100g Wasserstoffperoxid, 0.98 g/100g Glykolsäure

Mit bakterizider, levoruzider, fungizider, viruzider, mykobakterizider und sporizider Wirkung.

VAH zertifiziert

Verfallsdatum: siehe Aufdruck auf dem Gebinde



Oxivir Sporicide

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 20/03/2023 de-CH (K00028)