

Umweltfreundlich, stapelbar und für die Spülmaschine geeignet



melipul®
Mehrweg-Medikamenten-Becher

- Art.-Nr.  01305003 farblos-natur
 01305004 gelb
 01305006 rot
 01305007 grün
 01305012 braun
 01305013 blau

aus PP, graduierte Wandung
Inhalt: 25 ml, feine Skalierung
Maße: Ø 32 mm x H 40 mm

Gebrauchsanleitung

melipul® Mehrweg-Medikamenten-Becher

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Becher dient der Lagerung, Organisation und Vergabe von Fest- und Flüssigmedikamenten, er ist zum ökologisch sinnvollen, mehrmaligen Gebrauch bestimmt.

2. Aufbereitung – mehrmaliger Gebrauch

Zur Aufbereitung verwenden Sie bitte einen melipul® Becher-Spülkorb aus Edelstahl (Artikel Nr. 35005000 oder 35003000) und reinigen die Becher in einer Spülmaschine oder einem RDG.

Achten Sie auf die Verwendung des passenden Reinigungs- und Desinfektionsmittels für den Kunststoff Polypropylen. Fragen Sie Ihren Fachberater, für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, nach dem geeigneten Produkt.

Mehrwegprodukte können so lange im Zyklus aufbereitet werden, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen oder Beschädigungen auftreten, danach sollten diese ausgetauscht werden.

3. Eigenschaften

Material: Polypropylen
Maße: Ø 32 mm, Höhe 40 mm
Inhalt: 25 ml
Füllstriche: Teilung 1 mm
Gewicht: 5 Gramm
Packung: 60 Stück/Farbe



SCHWARZ Pflegesysteme

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6
88316 Isny im Allgäu

Telefon +49 (0) 7562 9755020
Telefax +49 (0) 7562 9755021
info@schwarz-pflegesysteme.de
www.schwarz-pflegesysteme.de

